

PERSPĖJIMAS!

NENAUDOKITE SU BREKETAIS
NEKRAMTYKITE DANTŲ APSAUGOS

Kad dantų apsauga saugotų, tiktų ir ilgiau laikytų naudokite ją tinkamai. Sukramtyta arba blogai nešiojama dantų apsauga mažiau saugo, taip pat mažėja jos ilgaamžiškumas.

PASIGAMINIMUI JUMS REIKĖS:

- > NANO 3D dantų apsaugą
- > Kiaurasamčio
- > Šalto vandens čiaupo
- > Indo
- > Veidrodžio
- > Verdančio vandens
- > Sekundinio laikmačio

PASIGAMINIMO INSTRUKCIJA:

1. Įpilkite į indą apie 10cm vandens. Užvirkite vandenį.
2. Nuimkite indą nuo kaitinimo šaltinio. Palikite vandenį 30 sekundžių atšalti, po to įdėkite dantų apsaugą į vandenį 40 sekundžių.
Nelaikykite daugiau, kaip 40 sekundžių.
3. Atsargia su kiaurasamčiu išimkite dantų apsaugą iš vandens.
4. 1-2 sekundes atvėsinkite dantų apsaugą po šalto vandens čiaupu.
5. Prieš įsidėdami dantų apsaugą į burną sudrėkinkite lūpas.
6. Žiūrint į veidrodį, atsargiai įsidėkite dantų apsaugą ties viršutinių dantų centro linija. Užfiksuokite dantų apsaugą ant viršutinių dantų, pirmiausia stipriai paspauskite ją ties krūminiais dantimis, po to ties priekiniais.
7. Stipriai sukaskite dantų apsaugą. 20 sekundžių per lūpas ir žandus su pirštais spauskite dantų apsaugos kraštus prie dantų.
8. Išsiimkite dantų apsaugą ir 30 sekundžių palaikykite po šalto vandens čiaupu. Įsidėkite dantų apsaugą į burną ir patikrinkite ar gerai pasigaminote.
9. Jei netinkamai pasigaminote pakartokite viską nuo 1 iki 8 žingsnio.

